



## Besonderheiten bei der Abdrucknahme für unsere In-Ear Hörer

- 1 Bitte verwenden Sie **NUR** Abdruckmassen mit **leicht druckaufbauender** Konsistenz!

Dreve: Otoform Ak, Otoform Ak X

Egger: A/II

++ Aus produktionstechnischen Gründen können wir keine anderen  
Materialien benutzen +++

- 2 Abformtiefe:
- Der **zweite Knick** des Gehörgangs muss **voll abgebildet** sein
  - **Concha samt Cymba** muss voll abgebildet sein

- 3 Während der Abformung:
- Mund geschlossen halten
  - entspanntes Gesicht
  - keinen Beisskeil verwenden!
  - keine Kaubewegungen!

- 4 Die Abdruckmasse bitte **mit einer Folie glattstreichen**.

Wenn Sie Fragen haben oder Ihnen bei der Abdrucknahme Besonderheiten aufgefallen sind, können Sie uns gerne anrufen: +49 (0)221 80064334

**Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit!**